

Datum: 11 augustus 2023

Update: 15 april 2024

Categorie: signaal vanuit Nederland

Onderwerp: teicoplanine bepaling in de Vitek

Duur signaal: enkele jaren

**Signaal:**

Via een aantal laboratoria in Nederland zijn wij geïnformeerd dat er mogelijk een probleem is met de teicoplanine bepaling bij stafylokokken (met name *S. aureus*) in de Vitek 2. Er wordt gemeld dat indien een stam teicoplanine resistent gemeten wordt in de Vitek, dit met andere testmethoden vaak niet geconfirmeerd kan worden. Tevens geven laboratoria aan dat er categoriële verschillen kunnen zijn wanneer Vitek-kaarten van verschillende lotnummers gebruikt worden bij 1 stam.

Indien u gebruik maakt van de Vitek en uw aanvragers teicoplanine voorschrijven, graag uw aandacht voor bovenstaande.

**Update 15 april 2024**

BioMérieux B.V. heeft intern onderzoek gedaan naar het bovenstaande en indien meer informatie hierover gewenst is, kan contact met BioMérieux worden opgenomen.